


Falt-Lesebrille



1

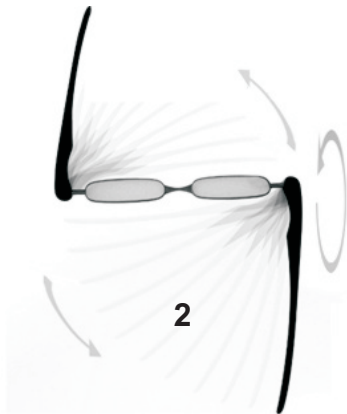

2



3

- 1 Die Bügel wie gezeigt nach oben und unten aufklappen.
- 2 Die Bügel nacheinander um 90° drehen, dabei die Gegenseite am Glasrand mit Daumen und Zeigefinger festhalten. Es spielt keine Rolle, in welche Richtung die Bügel gedreht werden.
- 3 Die Brille ist bereit zum Aufsetzen.
- 4 Die Bügel in umgekehrter Reihenfolge wieder drehen und dann einklappen.

Achtung: Die Bügel nicht in Pos. 3 einklappen, Bruchgefahr!

Nur für den kurzfristigen Gebrauch gedacht. Nicht geeignet für den Einsatz im Straßenverkehr!